



### Gebrauchsfertige Lösung zur alkoholfreien Flächendesinfektion und Reinigung

- nachhaltiger antimikrobieller Effekt (Remanenzeffekt) bis zu 10 Tage
- wirksam gegen Coronavirus
- sehr gute Hautverträglichkeit
- hoher Reinigungseffekt
- praxisnahe Anwendung geprüft im 4-Felder-Test



dermatest-garantie.de



#### Anwendungsgebiet

**Bacoban<sup>DL</sup>** ist eine gebrauchsfertige, wasserbasierte Lösung zur Flächendesinfektion und Reinigung mit nachhaltigem, antimikrobiellem Effekt (Remanenzeffekt).

#### Gebrauch

**Bacoban<sup>DL</sup>** auf die Oberfläche aufbringen und mit einem Tuch gleichmäßig verteilen bzw. gebrauchsfertiges Tuch entnehmen und Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen. Anschließend trocknen lassen. Nicht nachspülen oder trocken reiben.

Nachhaltiger antimikrobieller Effekt (**Remanenzeffekt**) bis zu **10 Tage** (geprüft in Anlehnung an ASTM E 2180). Dermatologisch getestet (Epikutantest mit 30 Probanden): sehr gute Hautverträglichkeit.

#### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: Benzalkoniumchlorid 0,26 g, Natriumpryithion 0,025 g, Polykondensate, Duftstoffe, gereinigtes Wasser.  
Inhaltsstoffe gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: unter 5% kationische Tenside, Desinfektionsmittel, Duftstoff. Formaldehydfrei, phenolfrei.

#### Lagerung

**Bacoban<sup>DL</sup>** bei +5 bis +25°C lagern. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

#### Lieferform

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
<b>Bacoban<sup>DL</sup></b> Flasche	12 x 500 ml	BAC500DL
<b>Bacoban<sup>DL</sup></b> Tücher	16 x 50 Stück	BACDLTUE
<b>Bacoban<sup>DL</sup></b> Kanister	1 x 5 l	BAC5000DL1

#### Gutachten

Unsere Produkte sind umfangreich geprüft. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere mikrobiologischen und dermatologischen Gutachten zur Verfügung.

#### Sicherheitshinweis

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Wichtig!** Die antimikrobiell remanente Wirkung von **Bacoban<sup>DL</sup>** darf nicht dazu führen, notwendige Desinfektionsmaßnahmen bei sichtbaren und/oder fraglichen Kontaminationen zu unterlassen!

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Biozid Reg. Nr.: N-34071 (D), 262/17/L (Lu)

#### Wirksamkeit

##### Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie und EN14476 Einwirkzeit

Begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. **Coronavirus**, HIV, HBV, HCV, Influenza, Herpes, Ebolavirus....) 5 min

Rotavirus 5 min

Norovirus 30 min

Papillomaviren (HPV) 60 min

##### Prüfung nach VAH-Anforderungen 2015 (mit Mechanik, hohe Belastung)

bakterizid und levurozid 5 min

#### EN-Normen

EN 1040 (bakterizid) 5 min

EN 1275 (levurozid) 5 min

EN 1276 (bakterizid) 5 min

EN 13727 (bakterizid) 5 min

EN 13624 (levurozid, fungizid) 5 min

EN 1650 (levurozid) 5 min

EN 13697 (bakterizid) 15 min

EN 14561 (bakterizid) 60 min

EN 14562 (levurozid) 60 min

EN 16615 (bakterizid, levurozid) (4-Felder-Test) 5 min